

使用說明書

關於各部位的安裝方法，請依第10至17頁說明的步驟進行安裝。


按摩椅

型號：JP-870

使用目的、功能效果

代替人手按摩
在一般家庭中使用

- ・ 感謝您購買本公司按摩椅。
- ・ 使用之前，請詳細閱讀本使用說明書，正確使用。
- ・ 使用前，請仔細閱讀第2至5頁「安全注意事項」，正確使用。
- ・ 閱讀完畢，請放置在隨時可以取閱處妥善保管。
- ・ 請依當地政府條例或規定處理外紙箱等廢棄物，以利資源回收。

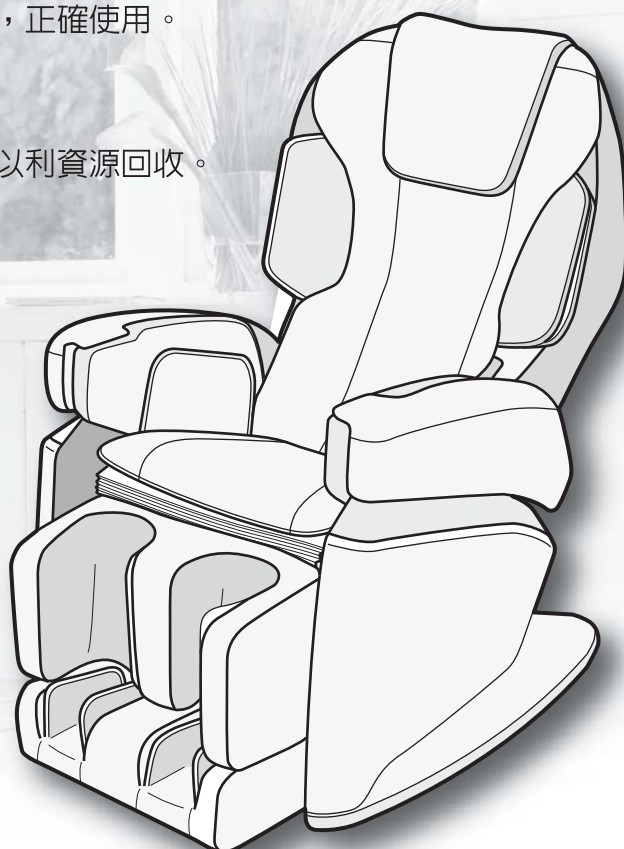

目錄

安全注意事項	4~7
各部位名稱及功能	8~9
設置與安裝	10~17
每次開始按摩前	18~19
給自己最舒適的角度	20~21
自動行程的使用方法	22~25
手動程式	26~28
氣壓按摩的使用方法	29
部位集中	30
依喜好調整按摩	31
依喜好調整按摩/附加功能	32~33
複合技法	34~35
按摩的基本動作	36~38
在進行按摩中改變按摩方式	39
溫熱	40
兒童安全鎖設定	41
檢修及保養方法	42~43
Q&A (問&答)	44~45
發現故障	46~47
商品規格	48

警告

1. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
2. 本產品的電源線如有任何損害時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

緊急處理方法

※當本機有動作異常現象發生時，請迅速關閉電源開關，拔掉電源插頭，並立即通知本公司服務單位處理，切勿自行拆修以免發生危險。

安全注意事項

- 使用前，務請仔細閱讀本「安全注意事項」後正確使用。
- 此處所示注意事項，旨在安全正確使用本產品，防止使用者和他人受到危害或損害。
- 為表明危害或損害程度和嚴重程度，注意事項分為「警告」、「注意」兩種，均為與安全有關之重要內容，務請遵守。

 警告	若使用有誤，推測可能導致使用者受較大的傷害及危害的程度。
 注意	若使用有誤，推測可能導致使用者受到傷害或可能會導致物品受到損害(註)。

(註)所謂物品受到損害，是指涉及房屋、家庭財產及家畜、寵物之損害。

	⊘符號表示禁止之行為。 圖中所示為具體指示之內容(例:左圖為禁止拆卸)。
	●符號表示強制或指示之內容。 圖中所示為具體指示之內容(例:左圖為從電源插座拔下電源插頭)。

* 閱讀本使用說明書之後，務請置於使用者可隨時取閱之處妥善保管。

提示

- 廢棄按摩椅機身和附屬品時，應依據當地政府條例或規定處理。
詳情請諮詢當地政府機關。

警告

	下列人士禁止使用。否則，會引起身體異常。 · 被醫生禁止接受按摩者 (例如：血栓(栓塞)症、嚴重動脈瘤、急性靜脈曲張、各種皮膚疾患及皮膚感染(包括皮下組織炎症)自主神經失調、服用安眠藥、酒醉、極度疲勞等。
	下列人士使用前，務請諮詢醫生。 ● 使用心律調整器等易於受到電磁波影響之體內植入式醫療裝置者。 ● 罹患惡性腫瘤者。 ● 罹患心臟疾患者。 ● 妊娠期或剛生產完者。 ● 糖尿病等所致嚴重末梢血液循環障礙之知覺障礙者。 ● 皮膚受損者。 ● 需要靜養者。 ● 體溫攝氏38 度以上(發燒期)者。 (例：急性炎症症狀(倦怠、寒顫、血壓變動等)強烈之時期。虛弱之時期)。 ● 骨質疏鬆症者、脊椎骨折、急性(疼痛性)疾患者。 脊柱異常者或脊柱側彎者。 ● 肌肉扭傷或拉傷等患有急性炎症者。 ● 椎間盤突出症者。 ● 身體感覺異常或正在接受醫療機關治療者。

警告

	不能運行或出現異常時，請立即拔下電源插頭，聯絡服務門市或銷售商進行檢查和維修。 以免觸電或漏電、短路等引發火災。
	昇降椅背和腿部按摩器以及調整腿部時，應確認後方和腿部按摩器下方沒有他人、寵物或物品，並於調整時避免將手、腳或頭夾在靠背和座位及扶手架之間。以免導致受傷。
	按摩頸部周圍時，應注意按摩球的動作，請勿過度強力按摩頸部，並避開喉嚨部位。 以免導致事故或受傷。
	使用前，請掀起背墊確認靠背部的椅套無任何破損，其他部分也無破損。（即使破損很小，也應立即停止使用，拔下電源插頭，委託修理）。 若在椅套破損狀態下使用，可能會導致觸電或受傷。
	椅套因磨耗而造成細微破損或穿孔時，應立即停止使用。請勿自行將椅套拆下、弄破或切開。 嚴禁在椅套破損狀態下使用，可能因衣服或頭髮被捲入造成傷害。
	請勿使用交流電110V 以外之電源。以免導致觸電或引起火災。
	若電源線和插頭破損或電源插座鬆動，應立即停止使用。以免導致觸電、短路和引起火花。 此時，務必洽詢服務門市或銷售商委託檢查和修理。
	若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。 以免導致觸電、短路和引起火災。
	勿損傷電源線。 勿損傷、損壞、加工、強行彎曲、牽拉、扭曲、束緊電源線。電源線上勿壓放重物，尤其在移動中捲入或夾住電源線。以免電源線破損，導致火災或觸電。
	勿讓兒童或無法表達自我意志者玩耍或操作使用。幼兒接近時需有成人到場陪同。 以免導致觸電或受傷。
	勿置於浴室等潮濕場所。 以免導致觸電、火災、故障、生鏽。
	千萬不得改裝、自行拆卸分解和修理。 以免導致火災、機械動作異常，造成受傷。

安全注意事項



注意

	每次使用時間控制在15分鐘之內。此外，同一部位之使用時間，建議在5分鐘之內。 連續使用時間過長，會損傷肌肉和神經。 < 建議> 一天使用時間，應控制在30分鐘之內。
	即使身體健康，若屬於下列範圍者，也務必洽詢醫生後使用。 (1) 由於年齡增長肌肉衰弱者或體格消瘦者 (2) 因骨骼或內臟所致腰痛者 (3) 易跌倒損傷者 (4) 有嚴重暈車暈船現象者 (5) 以往曾接受心臟或內臟手術者。
	使用過程中身體出現或感覺異常時，應立即停止使用，並及時就醫。
	若使用本按摩椅而出現發疹、發紅、發癢等症狀時，應停止使用，並及時就醫。 以免導致事故或身體不適。
	使用後，應切斷電源開關，從電源插座上拔下電源插頭。 以免因兒童玩耍等而導致事故。
	按摩椅應置於平坦地面使用。 以免導致故障和事故。
	使用前應確認操作開關和計時功能等是否正常運作。 以免導致事故或受傷。
	長時間未使用後，再次使用前，應先重新仔細閱讀本說明書，然後再確認按摩椅是否正常運作。 以免導致事故或受傷。
	腿部按摩器收縮時，勿將手腳置於座位與腿部按摩器之間。 以免導致故障或被夾住受傷。
	使用後若感覺身體不適，應立即停止使用並洽詢醫生意見。
	應注意不要被遙控器導線絆倒。 以免導致受傷。
	應先確認按摩球位置後，再緩慢就座。 以免導致事故或受傷。
	移動按摩椅時要平穩輕放。 以免刮傷地板表面。
	停電時，應立即切斷電源開關，從電源插座上拔下電源插頭。 以免重新通電時導致事故。
	拔下電源插頭時，應握住前端之插頭部分拔下，勿牽拉電源線。 以免導致觸電或短路，引發火花。
	不使用時，應從電源插座上拔下電源插頭。 以免灰塵或潮濕導致絕緣老化，引發漏電火災。
	進行保養時，應從電源插座上拔下電源插頭。並勿用濕手插拔電源插頭。 以免導致觸電和受傷。

! 注意



按摩時，應摘除髮飾、耳環、項鍊、圍巾、假指甲、手錶、戒指、手鐲等物品。以免導致受傷。

按摩大腿和臀部時，應檢查衣服(褲袋等)內沒有硬物。以免導致事故或受傷。

按摩過程中，勿拔掉電源插頭或切斷電源開關。以免受傷。

使用本按摩椅過程中，勿同時使用其他治療器。

使用過程中勿入睡。在無意識狀態中使用，會導致身體不適或受傷。

勿用於按摩以外之目的。以免引起故障或事故。

務必將電源插頭完全插入電源插座，不得在電源插頭上吸附大頭針或灰塵。
以免導致觸電、短路、起火。

勿在暖爐等高溫場所附近使用，勿邊吸煙邊使用。勿置於電熱毯等取暖器具上使用。
以免導致火災。

勿過分用力牽拉按摩椅布罩，也不得用刀或尖銳物扎刺。
以免導致故障和受傷。

勿用汽油、稀釋劑、酒精等擦拭，勿噴灑殺蟲劑。
以免導致觸電，引發火花。

勿坐在靠背、腿部按摩器、肩部、扶手或站在座位上。
以免導致故障或受傷。

勿在木地板、地毯等易於劃傷之表面移動腳輪或拖拉按摩椅。
以免損傷其表面。

勿放倒或強力撞擊按摩椅。以免導致故障或受傷。

勿餐後立即使用。以免造成身體不適。

勿飲酒後使用。以免導致事故或受傷。

勿載人或載物移動按摩椅。以免導致故障或受傷。

勿兩人以上同時坐在按摩椅上。以免導致故障或受傷。

勿用於未著衣情況。直接按摩皮膚會引起疼痛。

勿用於肘部、膝蓋、頭部、腹部。勿將手腳夾在按摩球之間。
以免引起身體不適或受傷。

勿將頭、手伸入腿部按摩器及按摩椅下面。以免導致事故或受傷。

切勿使用非本按摩椅的附件。以免導致故障。


勿在腿部按摩器抬起狀態下，強行坐下或起身。以免導致事故或受傷。

請勿自行卸下扶手架和手臂(氣壓組)進行使用。以免導致事故或受傷。

各部位名稱及功能

本體


前側

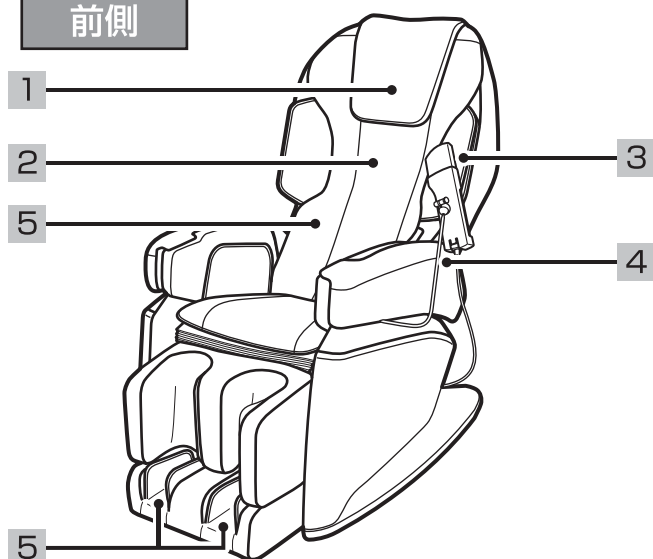

前側

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | 頭枕
按摩時將其掀到靠背後面。 |
| 2 | 背墊
用於整個背部按摩和腰部氣壓按摩。 |
| 3 | 遙控器 |
| 4 | 遙控器放置架 |
| 5 | 腳底溫熱
腳底溫熱裝置。 |


後側

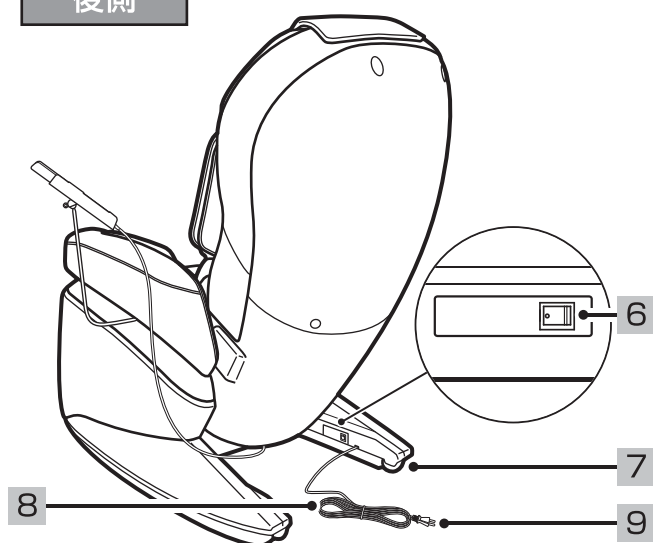

後側


- | | |
|---|------------------------|
| 6 | 電源開關
使用後應關閉。 |
| 7 | 移動輪 |
| 8 | 電源線 |
| 9 | 電源線插頭 |

按摩位置

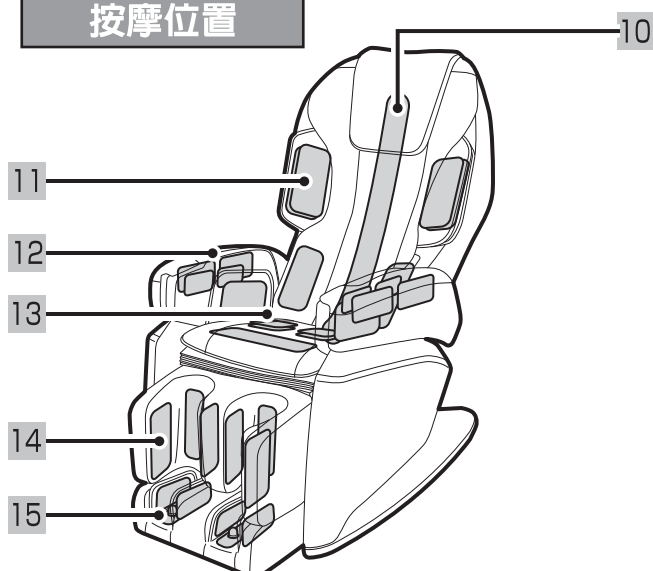

按摩位置

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 10 | 背部
背部按摩球上下範圍。 |
| 11 | 肩部(左右)
肩部氣壓按摩範圍。 |
| 12 | 手部(左右)
手部氣壓按摩範圍。 |
| 13 | 腰部(左右) / 臀部
腰部臀部氣壓按摩範圍。 |
| 14 | 腳部(左右)
腳部氣壓按摩範圍。 |
| 15 | 腳底(左右)
腳底指壓按摩範圍。 |

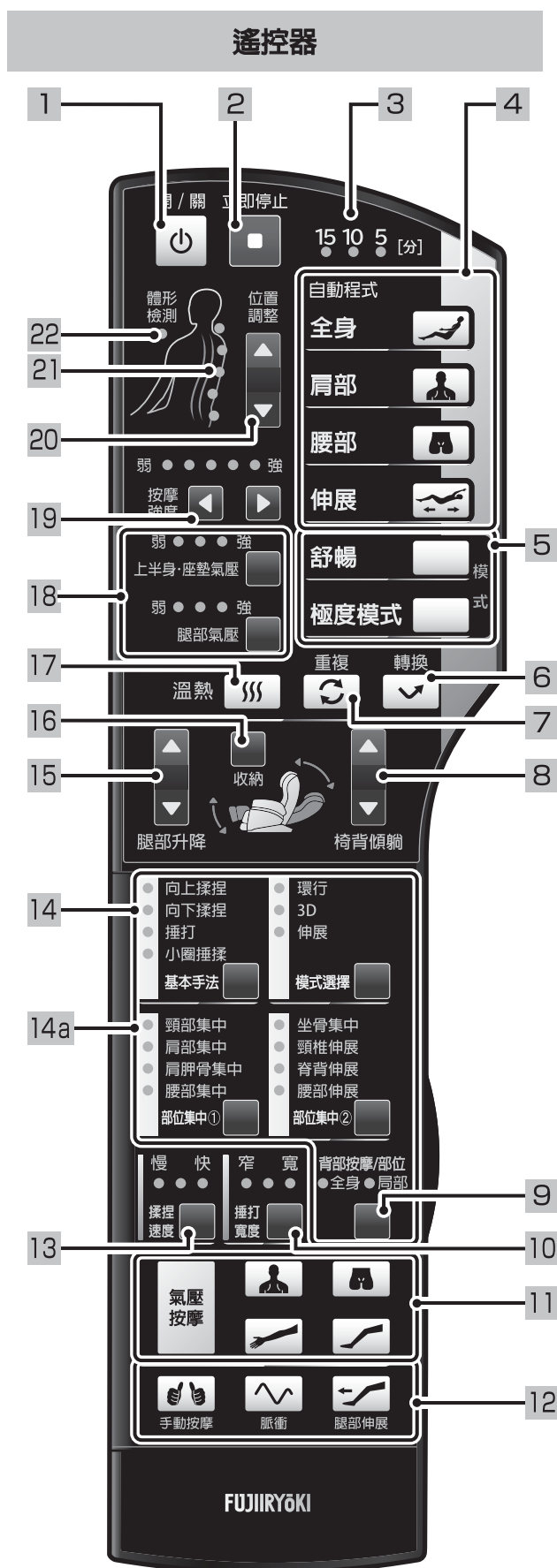

以上圖示為下蓋開啓後的狀態

名稱	
1	「開/ 關」鍵 按本鍵開啓/關閉電源。
2	「立即停止」鍵 按下此鍵，停止所有動作。 (要立即停止按摩時，可按下此鍵)。
3	當下剩餘的按摩時間顯示
4	全自動程式 4種全自動按摩程式可供選擇。
5	「模式」鍵
6	「轉換」鍵 在自動行程中，按下此鍵可停止目前之按摩部位，移至下一個按摩動作。
7	「重複」鍵 現有的行程再重複一次。
8	「椅背傾躺」調整鍵
9	「按摩範圍」選擇鍵 可選擇「全身」、「局部」、「定點」等不同的按摩範圍。
10	「捶打寬度」調整鍵 可選擇「窄」「中」「寬」3種捶打寬度。
11	「氣壓按摩部位」選擇鍵 可選擇開啓或關閉「肩」「腰部・座墊」「手部」「腳部」等部位的氣壓按摩。
12	「氣壓按摩」相關按鍵 可開啓或關閉「腿側」「腳部伸展」「律動」等部位的氣壓按摩。
13	「揉捏速度」調整鍵 可選擇「慢」「中」「快」「緩慢」4種揉捏速度。
14	「手動按摩程式」選擇鍵 計16種按摩手法可選擇。
14a	集中部位
15	「腳部升降」調整鍵
16	「收納」鍵 按下本鍵，按摩椅即回復至收納狀態。
17	「溫熱」開關鍵
18	「氣壓按摩強度」選擇鍵 可選擇「上半身・座墊」與「腿部、腳部」氣壓按摩強度計5種強度。
19	「按摩強度」調整鍵 9種按摩強度可供選擇。
20	按摩球位置調整鍵
21	按摩球位置顯示燈號
22	體型感應(偵測)顯示燈號

設置與安裝

確認機身及附屬品

⚠ 注意


不要使用附屬品以外的物。
以免導致損壞。

產品說明書等的資料


● 產品說明書

● 組裝單


● 機身

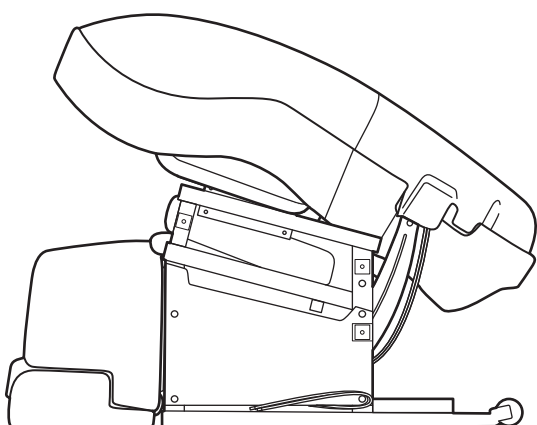


● 頭枕

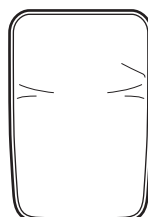


● 背墊

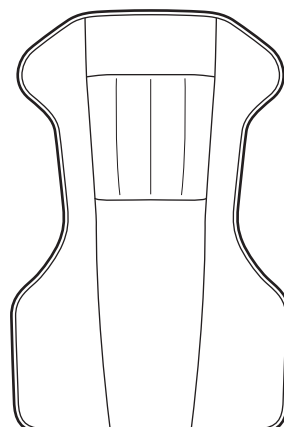


● 扶手架（右）（左）

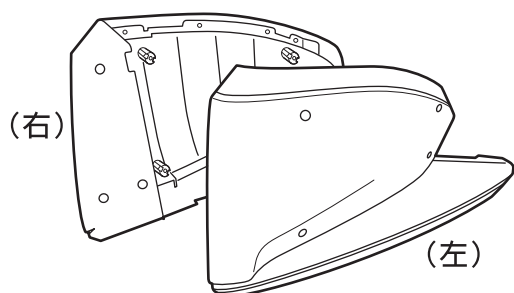


● 手腕組件（右）（左）

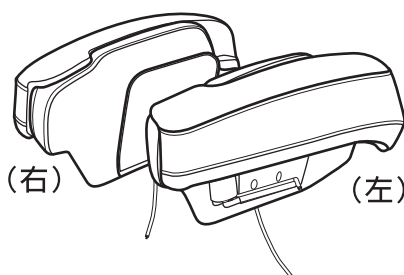


● 六角扳手

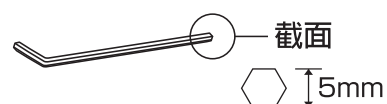


● 組裝扶手架的螺絲 （長）：8個

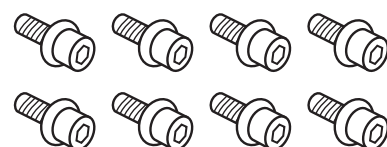


● 螺絲蓋 8個

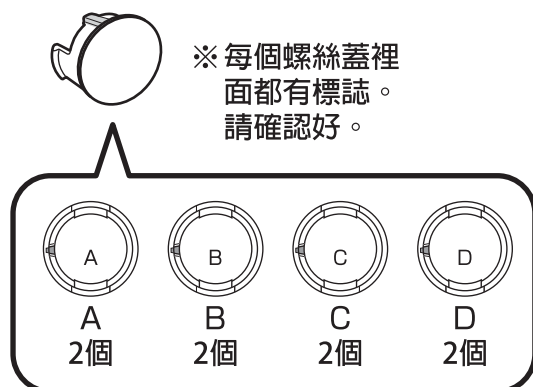

● 遙控器放置架

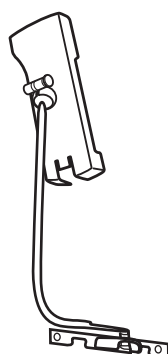

● 組裝手腕件的螺絲 （短）：6個

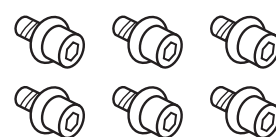

決定機身設置的場所

⚠ 警告


不要在浴室等濕氣大的場所使用及放置。
以免導致觸電・火災・故障・發霉・生鏽。

⚠ 注意

置於水平場所使用。
以免導致故障或事故。
不要在暖爐等離火較近的場所使用、或邊抽煙邊使用。此外，不要在電熱毯等取暖設備上使用。
以免導致火災。

設置於水平處，並在其周圍留出空間。

- 打開電源後靠背會自動傾斜，腿部也會上昇。為防止碰觸到周圍物品，請預先在前方留出35cm以上、在後方留出50cm以上的空間。
- 座椅躺放時腿部也會上昇。
- 由於會損傷木質地板或地面，建議在機身下鋪設地毯等。
- 避免設置於日照長的地方或取暖設備附近、高溫之處。
以免導致機身或附屬品變色、變質。

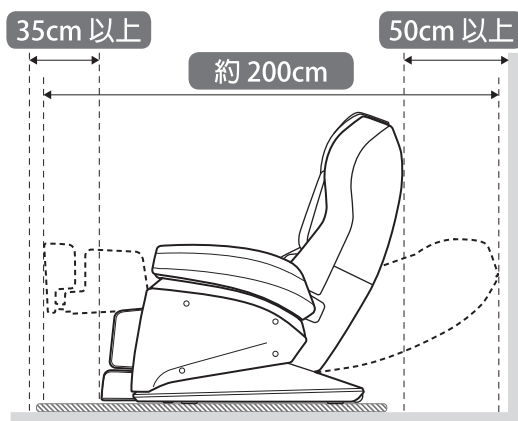


設置機身

⚠ 注意


不要載人或物移動。
以免導致故障或受傷。
不要在木質地板或容易損傷的地板上拖拽、或使用腳輪移動。
以免導致損傷地板。
不要被電源線或遙控器的線絆倒，或纏繞在腳輪上。
以免導致受傷。

用手托住機身前側下部及背墊下部（參照下圖），抬起後移動。

- 因為是重物，所以必須2人以上搬運。
- 請注意腳下，慢慢放下。

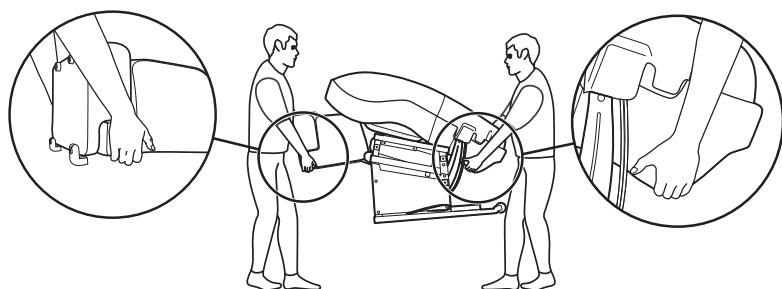

寬度需要70cm以上
(機身搬運的寬度為68cm+間隔2cm)

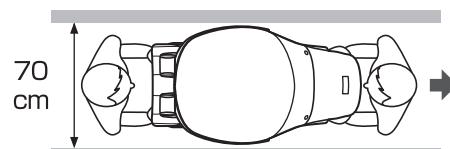


設置與安裝

掀起靠背部分

按照箭頭的方向立起靠背，確認止動器（○部分）是否固定好。
（聽到咔際的聲音表示固定好了。）


- 移動靠背時，不要將手或手指伸到座位和靠背之間。
- 另外，請注意不要夾到遙控器的線和電源線。

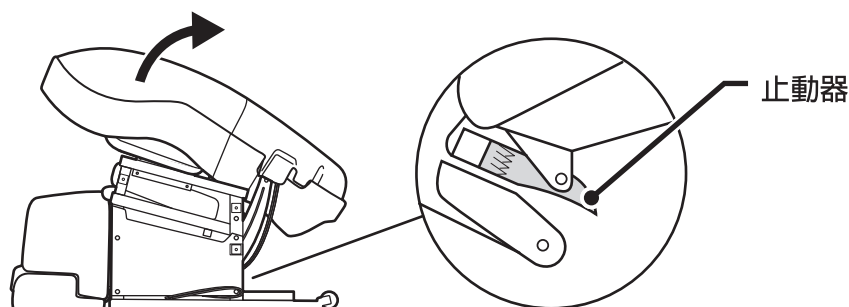

放倒靠背時


按照箭頭的方向按下靠背部分中間的止動器（○部分）以解除止動器，然後用手扶著靠背部分緩慢向前放下。

- 注意不要急劇放倒。
- 靠背部分安裝著扶手架、手腕組件時無法放倒。
- 操作止動器時，除了止動器以外，不要觸動其他部分。

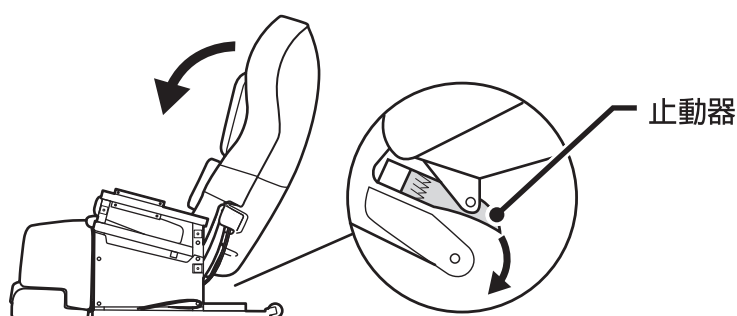


安裝手腕組件（左右兩方）

1. 將黃色的軟管從座位和框架之間穿過，把手腕組件扣住。

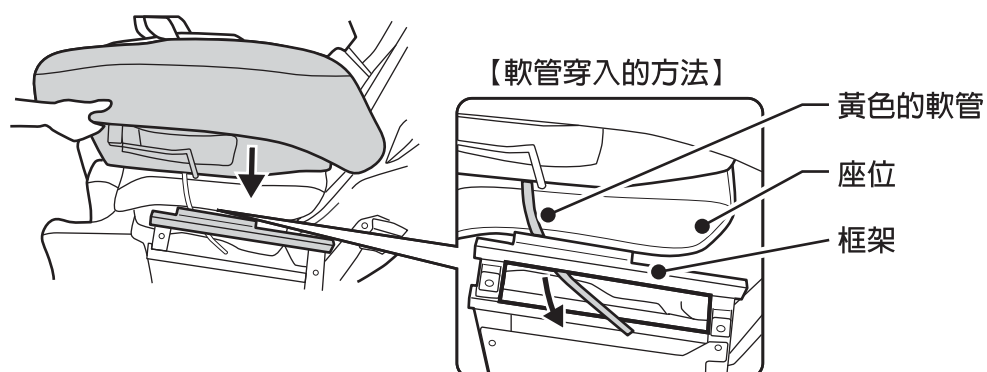


2. 將顏色對應的手腕組件軟管（灰色・黃色）與機身的軟管連接。

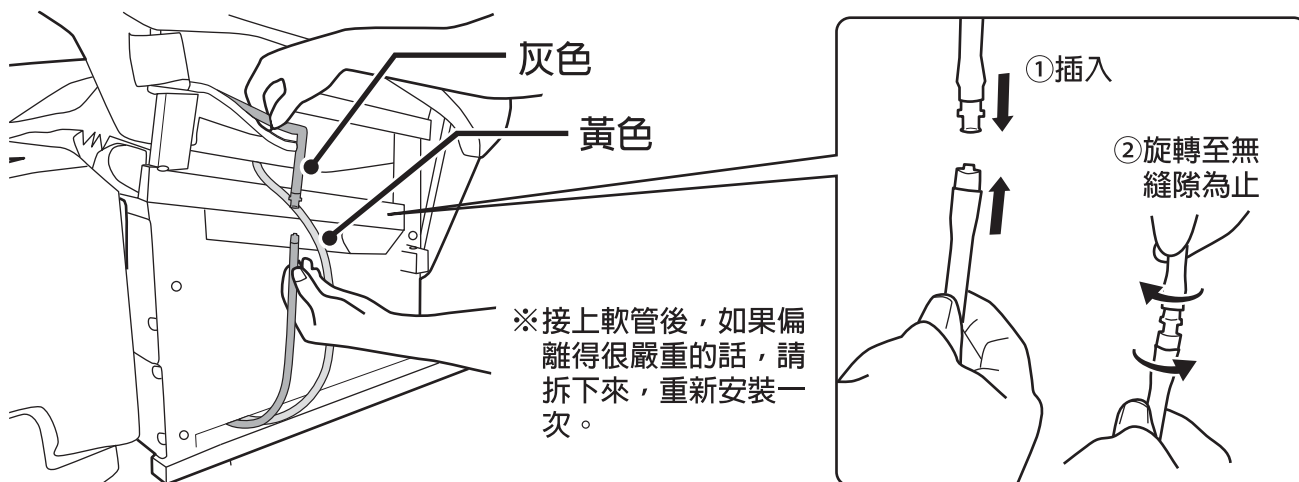


3. 擰緊手腕組件的螺絲。 安裝遙控器放置架時，連同遙控器放置架的螺絲也一起擰緊。

- 遙控器放置架通常安裝在左手邊。

【只安裝手腕組件時】

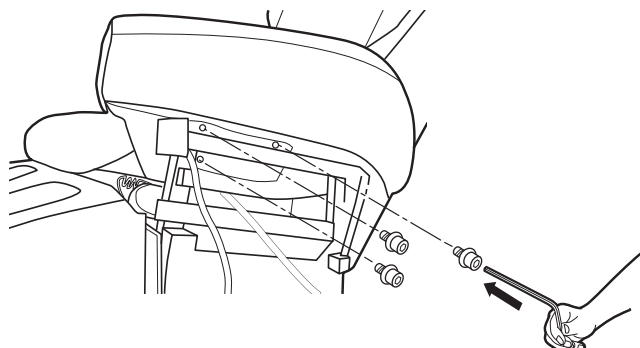

【安裝遙控器放置架時】

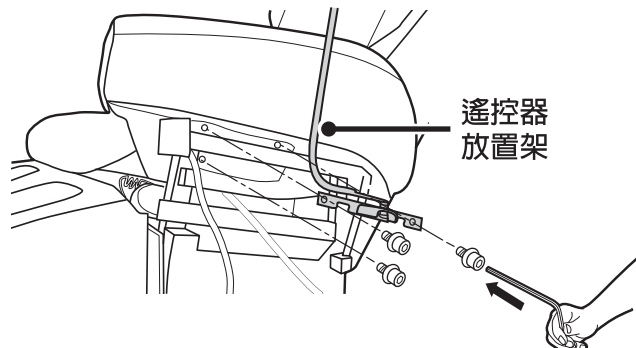


※ 想把遙控器放置架安裝在右手邊時

- 把遙控器放置架安裝在右手邊的情況下，請按照以下的操作進行。
把遙控器放置架安裝在左手邊的話，請忽略以下安裝說明。



- ① 把遙控器放置架底部的螺絲卸下來。
- ② 把遙控器放置架向右傾斜，並將螺絲安裝在左邊的孔裡。

① 卸下螺絲

※ 遙控器放置架的底部放大圖（從上往下看的圖）

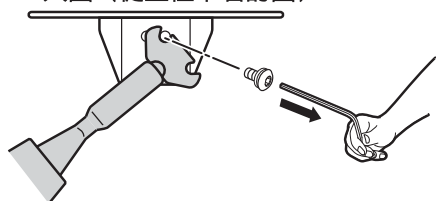

② 把放置架向右傾斜，並將右邊凹進去的地方和左邊的螺絲孔對齊，擰緊螺絲。

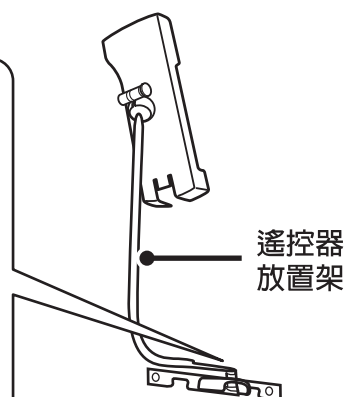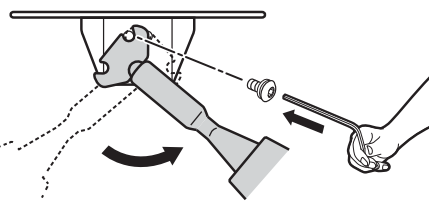


設置與安裝

安裝手扶架

【左扶手架的安裝方法】


1. ①左扶手架的前側與框架對齊。
②把手腕組件稍微抬起來與後側對齊。

※與機身對齊時，一定要邊抬著手腕組件邊安裝。
如果不邊抬著邊對齊，可能會導致受傷。

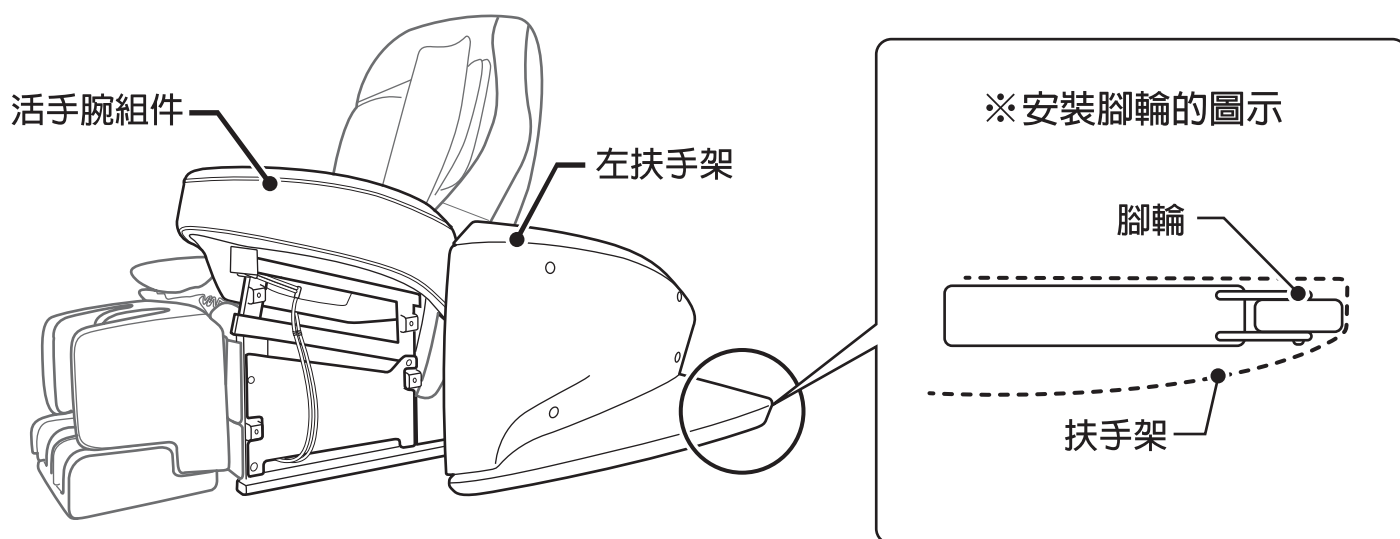

2. 擰緊扶手架的螺絲。

- 使用六角扳手，把扶手架的螺絲按照下圖①→②→③→④的順序暫時擰一下後，再按照①→②→③→④的順序擰緊。
- 如果沒擰緊的話，可能導致扶手架脫落、故障或受傷。

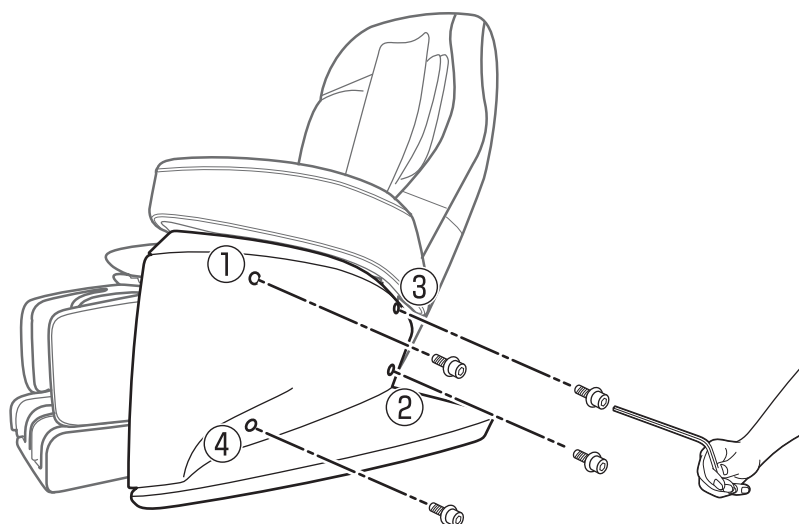



【右扶手架的安裝方法】

1. ①右扶手架的後側與電源開關槽對齊。
②把手腕組件稍微抬起來與機身對齊。

※與機身對齊時，一定要邊抬著手腕組件邊安裝。
如果不邊抬著邊對齊，可能會導致受傷。


※電源開關槽的安裝圖示

首先，把右扶手架蓋在腳輪和電源開關槽上。

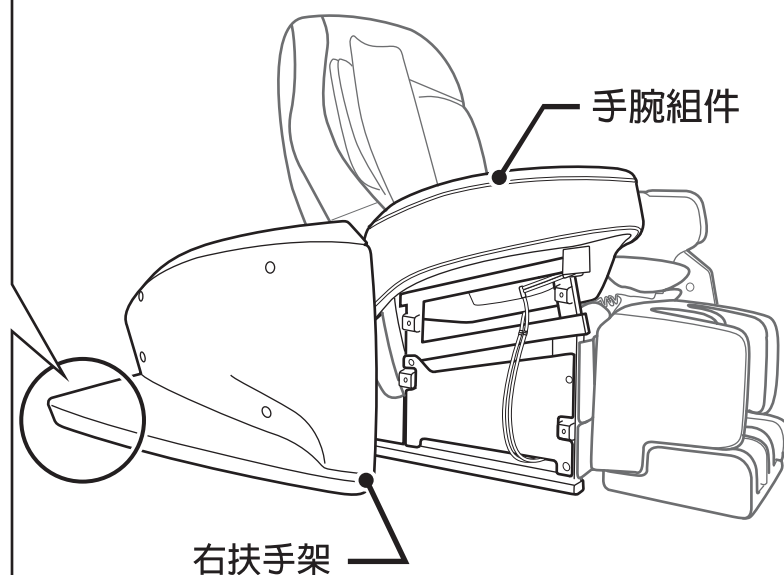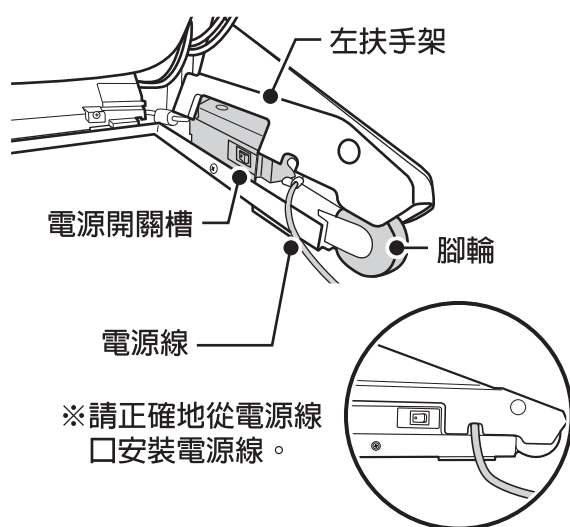

2. 擰緊扶手架的螺絲。

- 使用六角扳手，把扶手架的螺絲按照下圖①→②→③→④的順序暫時擰一下後，再按照①→②→③→④的順序擰緊。
- 如果沒擰緊的話，可能導致扶手架脫落、故障或受傷。

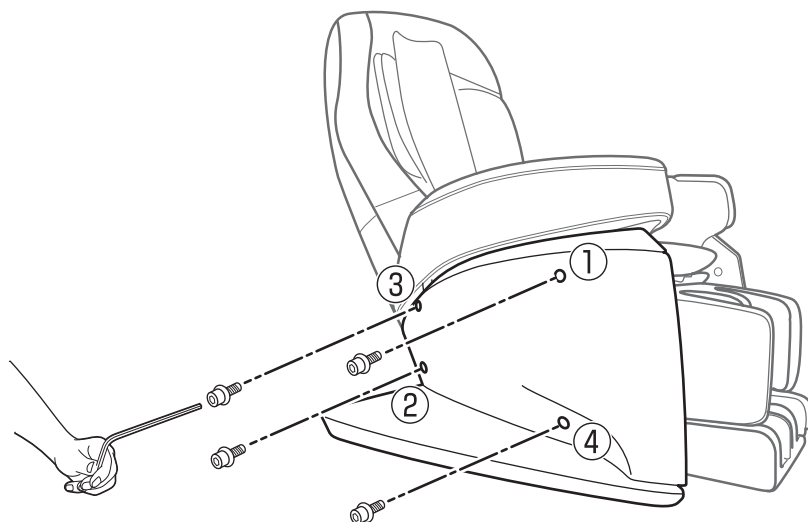


設置與安裝


3. 安裝螺絲蓋。（左右兩面）

- 螺絲蓋與每個螺絲對應。
- 確認螺絲背面的標誌後再安裝。
- 若螺絲蓋不緊的話，可能是安裝錯了，請仔細確認。


※ 按照記號部分，把機身凹進去的部分與螺絲凸出來的部分對齊安裝起來。

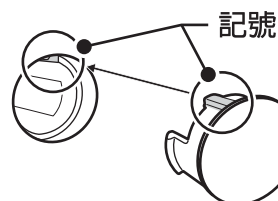

【左側】

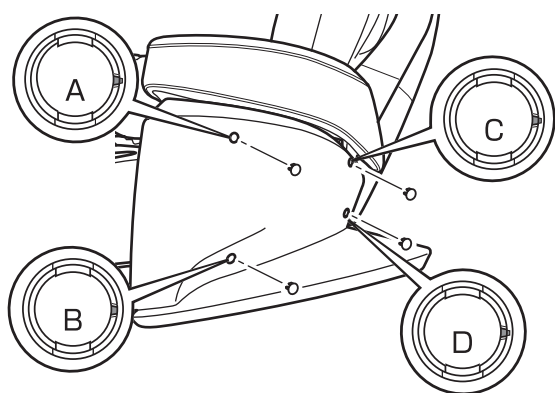

【右側】

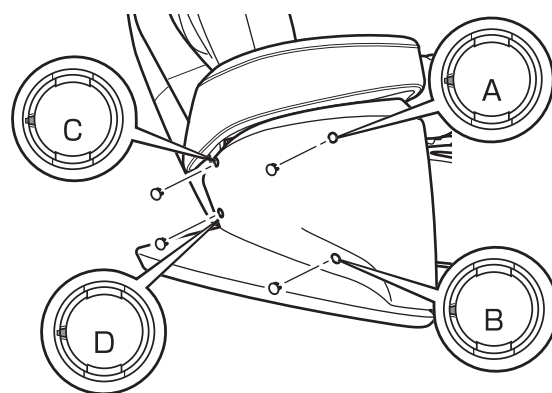


安裝遙控器

【安裝方法】

把遙控器從上面插入。

【拿下來的方法】


把遙控器從上面拿出來。

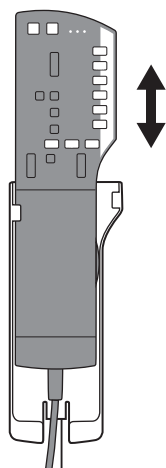

【遙控器放置架的調節方法】


旋轉用於固定的螺絲，固定於喜歡的位置。

※ 固定螺絲旋轉過度的話，會損壞，請注意。

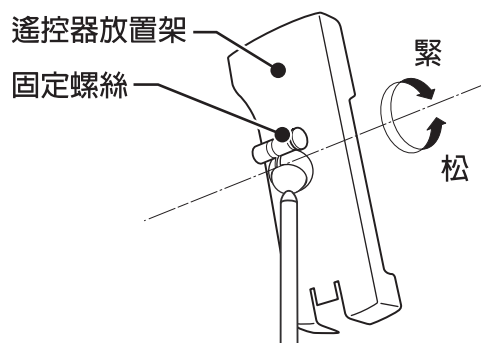


安裝背墊・頭枕

1. 把背墊固定到靠背的拉鏈上。

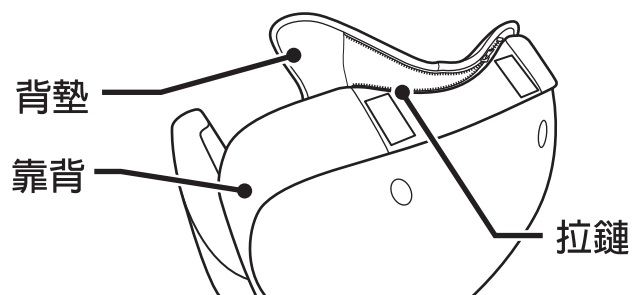

2. 把頭枕固定到靠背的魔術貼上。

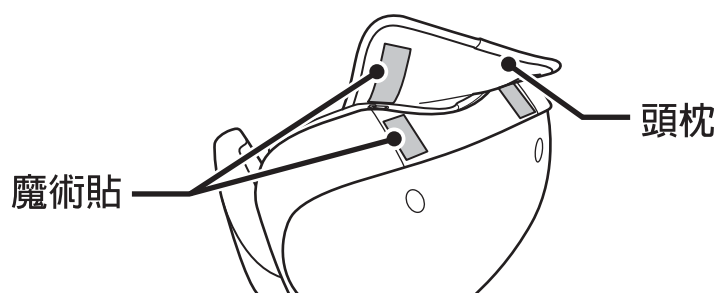


- 按摩時，請裝上背墊，將頭枕掀到後面。
- 感到按摩力度強烈時，請裝上頭枕。
- 不按摩時，不必拆下背墊・頭枕，可作為躺椅使用。

每次開始按摩前

確認事項

請務必確認周圍狀況

- 確認按摩椅之後面和腿部按摩器前方與下方等周圍沒有人、寵物、物品等。

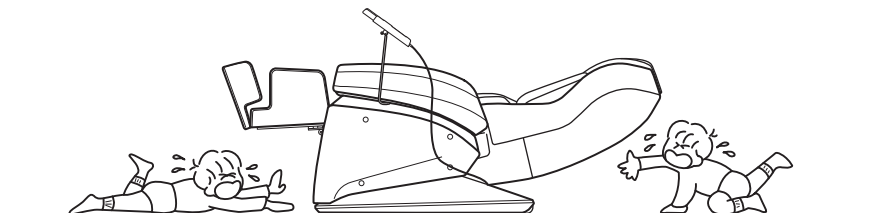

接通電源

! 警告


請勿使用交流110V以外的電源。以免導致觸電或引起火災。

若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
以免導致觸電、短路和引起火災。

若電源線和插頭破損或電源插座鬆動，應立即停止使用。以免導致觸電、短路和引起火花。
此時，務必洽詢服務門市或銷售商委託檢查和修理。


1. 將電源插頭插入電源插座。

- 確實檢查電源線、遙控器線、電源插頭是否損傷，檢查電源插頭上是否黏附頭髮或灰塵等。

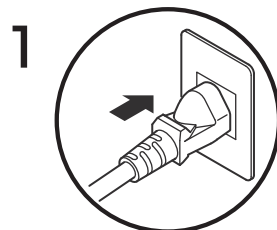

2. 打開電源開關。

- 電源開關位於左移動輪的內側。

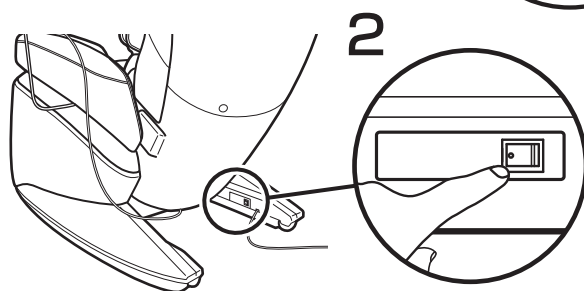


3. 按下 鍵，開啓電源。

-  燈號閃爍，腳墊自動升起至定位(待機位置)。

(按下  或  鍵，可停止腳墊上升。)

- 約3分鐘沒有其他動作， 燈號將自動熄滅。

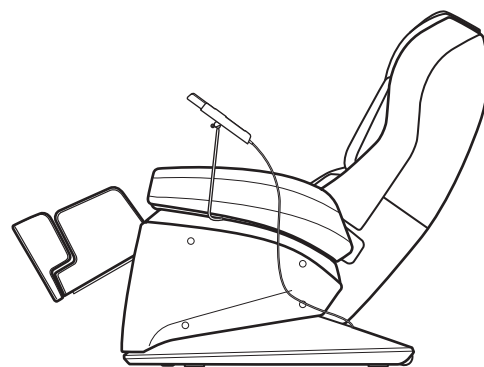

待機位置

確認按摩椅狀態

1. 檢查靠背椅套有無破損



警告

按摩椅表面若發現有破損的狀況，請立即停止使用。

請勿故意使用刀具或尖銳的東西接觸皮面。

※在表面破損的狀態下繼續使用，有可能會發生衣物、頭髮捲入的情形，將會造成傷害，請勿繼續使用。

2. 檢查有無夾到異物



注意

按摩椅使用前請檢查背部、腳部、手部等地方有無夾到異物，若有請清除。

※避免發生意外事故。




3. 檢查按摩球收納位置應在靠背下方

- 若發現按摩球沒有在靠背下方時，請按下  鍵使其回復至定位。



注意

按摩椅使用前請檢查按摩球收納位置應在靠背下方。※避免發生意外事故。

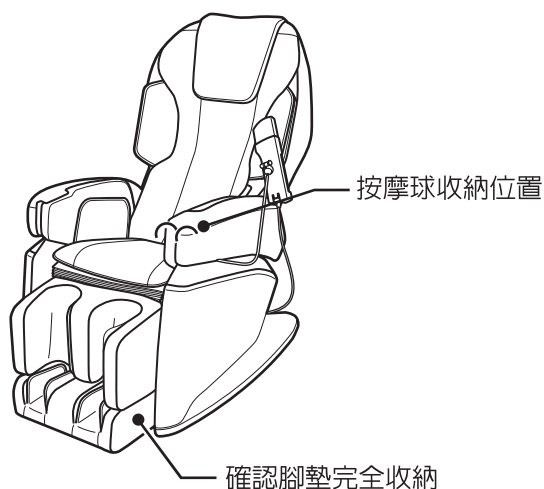

4. 確認腳墊完全收納

- 抬起腳部時，打開電源，按下腳部角度  鍵，放下腳部。

腿部升降



注意

腳墊沒有完全收納至定位時，請勿上下按摩椅。

※容易造成意外事故或機器損壞。

給自己最舒適的角度



警告

調整按摩椅的姿勢時，勿將手腳夾於椅背與側板間。並確認椅背、腳墊下方沒有人、寵物、物品等障礙。

勿將異物伸入按摩椅的縫隙中。

請勿將異物伸入按摩椅的縫隙中，包括

- 椅子下方
 - 靠背與座墊間
 - 座墊與側板間
 - 腳墊的下方與後方
 - 座墊與腳墊間
- 等處同時應檢查有無夾住異物。


腳墊上升/下降與伸展長度的調整方法

1



腿部升降

按下左鍵調整腳墊升降。

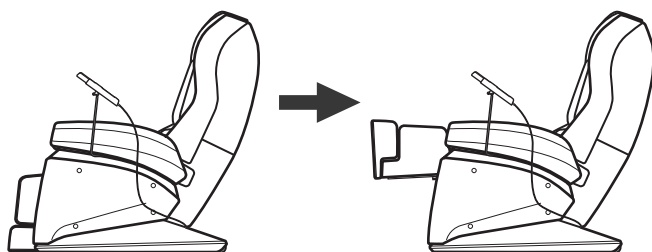


腳墊下降
(收納位置)


腳墊上升

2

利用自身腳部伸縮調整腳墊長度。

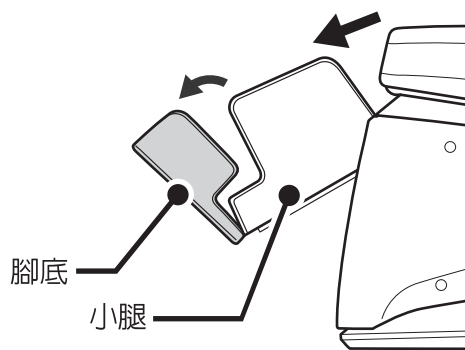

- 如上圖，利用自身的腳部伸縮，調整腳墊的長度。

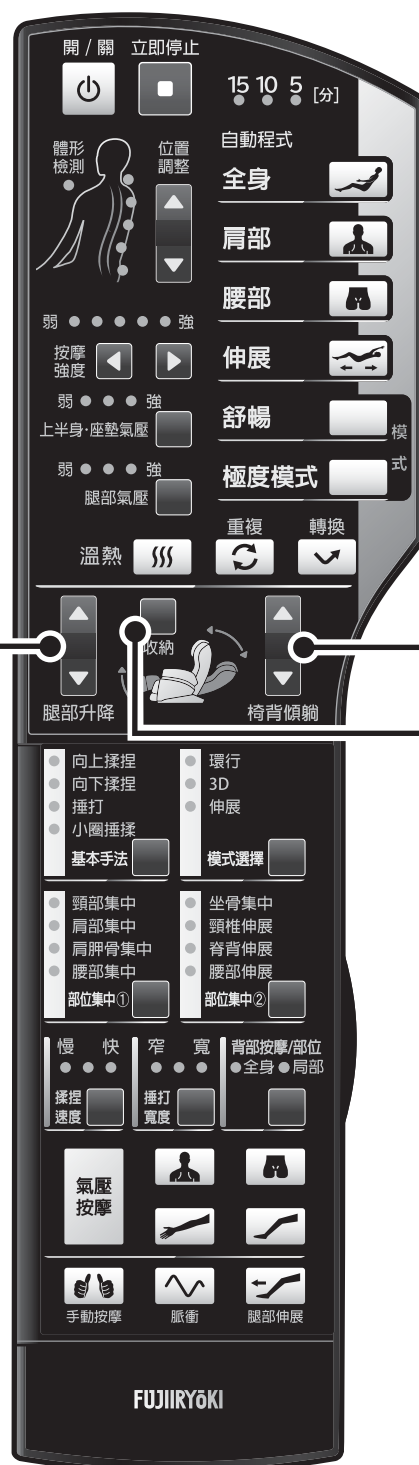



注意

放下腳墊時，勿將手腳夾於腳墊下方。並確認椅背後面和腳墊下方沒有人、寵物、物品等障礙。否則可能會導致受傷。

腳墊上方禁止乘坐或站立。

否則可能會傾倒、跌落導致受傷，或損壞機器。

腳墊抬起狀態下，不要強行坐下和離去。

否則可能會傾倒、跌落導致受傷，或損壞機器。

背部傾躺的調整方法

3




按下左鍵調整背部傾躺。

椅背傾躺

- 當背部越往下傾斜時，按摩的強度將更強。
- 背部傾躺與腳墊升降為連動裝置，腳墊可單獨升降。



正坐

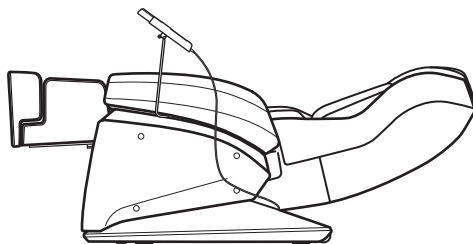

傾躺

安裝手扶架

4

開 / 關



閃爍時，按下

收納



鍵。

開 / 關



鍵閃爍時，可以進行操作。

- 在程式結束後按摩球收起或電源OFF準備中的
- 座椅靠背向上升起，腿部下降至收納位置。

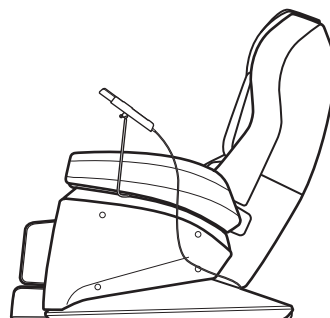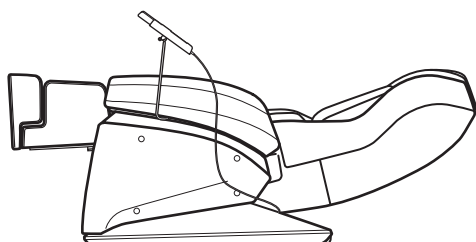

自動行程的使用方法

自動按摩程式



1 按下 **開/關** 鍵，開啟電源。

- **開/關** 鍵點亮，靠背自動傾斜至待機位置，腿部上升。
(按 **立即停止** 鍵或 **腿部升降** 鍵或 **椅背傾躺** 鍵，可以中斷程式。)
- 約3分鐘以上不進行操作時，電源會自動切斷，**開/關** 鍵燈滅

2 選擇喜好的自動程式。

- 全身** (全身按摩)。
- 肩部** (肩部按摩)。
- 腰部** (腰部按摩)。
- 伸展** (伸展)。

- 被選擇的程式燈號將持續亮起。

自動程式的特性

全身

用於全身按摩，包括揉捏、捶打與氣壓等等的按摩手法。

肩部

著重在肩部的按摩手法。

腰部

著重在腰部的按摩手法。


伸展

(伸展)。
幫助全身做伸展動作的按摩手法。

3

雙重檢測功能（以下簡稱：檢測）

是指進行自動程式按摩之前，進行體型和姿勢檢測的感應機能。
是進行檢測背筋曲線的「S曲線檢測系統」和檢測肩部位置的「肩部位置檢測系統」2種感應機能的按摩。

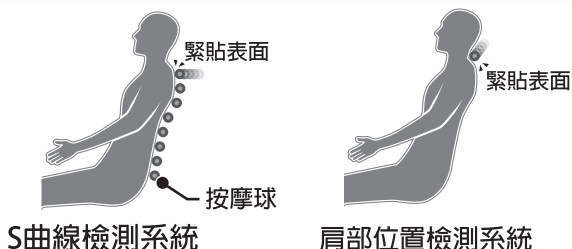


檢測開始。 ※有些程式不能進行檢測

- 檢測時，請舒展身體，把頭部靠在座椅靠背上躺下。
- 檢測時，請不要讓頭部離開座椅靠背。

① 開始檢測背筋曲線。

② 開始自動檢測肩部位置。

- 檢測結束後，在檢測出的肩部位置，進行約7秒鐘的敲擊按摩動作。

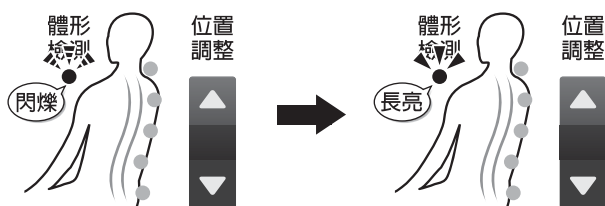


檢測時，體型檢測的燈閃爍，
檢測結束後，燈長亮。

手動調整肩部位置的情況

- 肩部位置不合適時，可以通過  鍵調整。
- 若約7秒左右肩部位置沒有變化，該位置被設置為肩部位置。
- 若想立刻決定，請按  鍵。
- 有11個級別可供調節。

按摩球的位置
請把按摩球與頸肩
根部對齊。

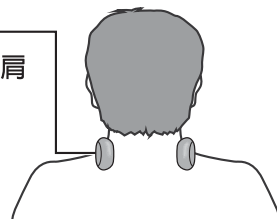

無法進行檢測的情況

- 「嗶—」的聲音響，體型檢測的燈快速閃爍。（約5秒）
- 無法進行檢測時，請再次選擇自動程序、進行檢測。
- 檢測時，請舒展身體，把頭部靠在靠背上緩慢躺下。

4

開始按摩。


- 每次的按摩時間為16分鐘，開始按摩後，剩餘的按摩時間將顯示在燈號上。



- 按摩球位置、揉捏速度與氣壓強度皆有燈號顯示。

自動行程的使用方法

5 調節按摩強度。

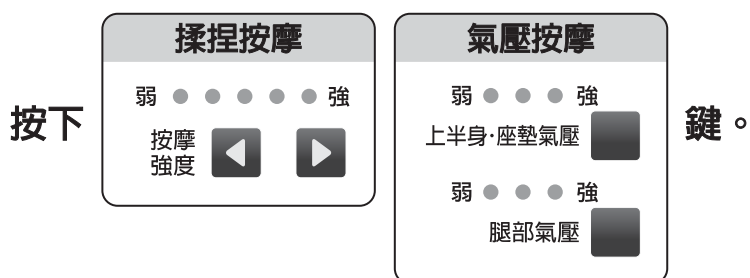


- 強度，揉捏技法有9個級別，氣壓有5個級別可供選擇。
- 初始設定，揉捏技法為「5」，氣壓為「3」（中間值）。
- 選擇的強度亮燈。
- 揉捏技法按摩的強度為最大、最小時，繼續按鍵強度也不會改變。

6 按摩完畢後

- 按摩球將回復至收納位置。
 - 傾躺的椅背與升起的腳墊將會維持在設定的姿勢。
- 收納  按下收納鍵可將椅背與腳墊回復至收納位置。

7 關閉電源總開關，並拔下插頭

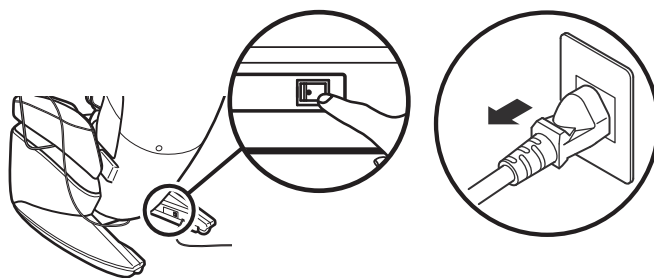

緊急停止

立即停止

 按下。

- 按下「急停止」按鍵，將立即停止所有動作。

中途欲停止按摩

開 / 關

 按下。

- 將立即停止所有動作，按摩球回到收納位置。

從自動程式轉換到極度模式/舒暢程式

極度模式程式/舒暢程式是指

在基本程式的基礎上，可以選擇極度模式/舒暢模式，改變程式內容。

極度模式：轉換為比基本程式強度大的按摩程式。

舒暢模式：轉換為比基本程式柔和的按摩程式。

※伸展程式中的舒暢模式只含有氣壓按摩。



從自動程式轉換到舒暢程式・極度模式程式的情況

1 在選擇自動程式後，請按 舒暢 鍵或 極度模式 鍵。

- 正在檢測時，無法進行各種模式設定。
請在檢測結束後，選擇各種模式。

選擇、開始舒暢程式・極度模式程式的情況

2 按 舒暢 鍵或 極度模式 鍵。

- 選擇的模式鍵和 全身 鍵亮燈。
- 進行檢測後，選擇的全身程式開始。

3 轉換到肩部/腰部/伸展程式時，請選擇按下喜好的程式鍵。

肩部 

腰部 

伸展 

- 選擇的鍵亮燈，選擇的程式開始。
- 進行檢測時，無法轉換到自動程式。
請在檢測結束後，轉換到想選擇的程式。

手動程式

「基本手法」說明



1 按下  鍵，開啟電源。

-  鍵點亮，靠背自動傾斜至待機位置，腿部上升。
(按  鍵或  鍵或  鍵，可以中斷程式。)
- 約3分鐘以上不進行操作時，電源會自動切斷，
 鍵燈滅

2 按下 基本手法  選擇喜好的揉捏程式。

● 向上揉捏
● 向下揉捏
● 捶打
● 小圈捶揉

● 向上揉捏
● 向下揉捏
● 捶打
● 小圈捶揉

● 向上揉捏
● 向下揉捏
● 捶打
● 小圈捶揉

● 向上揉捏
● 向下揉捏
● 捶打
● 小圈捶揉

- 被選擇的程式燈號將持續亮起。
- 接續按下按鍵可跳轉至下一個揉捏程式。

3 開始按摩。

「模式選擇」說明




依照喜好選擇(變更)揉捏模式

- 1 按下 **基本手法** 按鍵選擇揉捏程式後，再按下 **模式選擇** 按鍵選擇揉捏模式。


選擇與使用「揉捏模式」

- 2 依照喜好按下 **模式選擇** 選擇揉捏模式

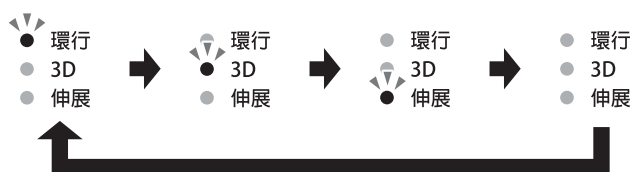

- 被選擇的程式燈號將持續亮起。

- 3 按下 **基本手法** 選擇喜好的揉捏程式。

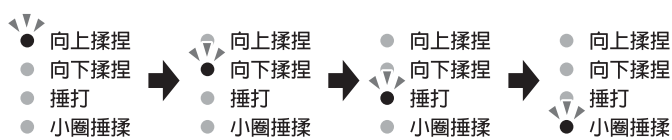

- 被選擇的程式燈號將持續亮起。
- 接續按下按鍵可跳轉至下一個揉捏程式。

- 4 開始按摩。

手動程式

「背部按摩」說明



1 按下  鍵，開啟電源。

-  鍵點亮，靠背自動傾斜至待機位置，腿部上升。
(按  鍵或  鍵或  鍵，可以中斷程式。)
- 約3分鐘以上不進行操作時，電源會自動切斷，
 鍵燈滅

2 按下  選擇背部按摩範圍
分別為「全身」「局部」。

 全身 ● 局部 → ● 全身 ● 局部

- 被選擇的程式燈號將持續亮起。
- 接續按下按鍵可跳轉至下一個按摩範圍。

3 選擇「全身」鍵，開始自動檢測肩部位置。

- 關於自動檢測肩部位置的詳細內容，
請參照「雙重檢測功能」。(P23)
- 選擇「局部」鍵時， 鍵可調節按摩位置。

4 開始按摩。

氣壓按摩的使用方法

依喜好選擇氣壓按摩部位



1

按下  鍵，開啟電源。

-  鍵點亮，靠背自動傾斜至待機位置，腿部上升。
(按  鍵或  鍵或  鍵，可以中斷程式。)
- 約3分鐘以上不進行操作時，電源會自動切斷，
 鍵燈滅

2

依照喜好選擇氣壓按摩部位



：肩部



：腰部·座部



：腕部



：脚部

- 被選擇的程式燈號將持續亮起。
- 可搭配選擇，燈全亮為全身氣壓按摩。

3

開始按摩。

部位集中

「部位集中」說明



1 按下  鍵，開啟電源。

● 開 / 關  鍵點亮，靠背自動傾斜至待機位置，腿部上升。

● 立即停止 (按  鍵或  鍵或  鍵，可以中斷程式。)

● 約3分鐘以上不進行操作時，電源會自動切斷，
開 / 關  鍵燈滅

2 依照喜好選擇並按下 部位集中①  或 部位集中② 

部位集中①

● 頸部集中 ● 頸部集中 ● 頸部集中 ● 頸部集中
● 肩部集中 ● 肩部集中 ● 肩部集中 ● 肩部集中
● 肩胛骨集中 ● 肩胛骨集中 ● 肩胛骨集中 ● 肩胛骨集中
● 腰部集中 ● 腰部集中 ● 腰部集中 ● 腰部集中

部位集中②

● 坐骨集中 ● 坐骨集中 ● 坐骨集中 ● 坐骨集中
● 頸椎伸展 ● 頸椎伸展 ● 頸椎伸展 ● 頸椎伸展
● 脊椎伸展 ● 脊椎伸展 ● 脊椎伸展 ● 脊椎伸展
● 腰部伸展 ● 腰部伸展 ● 腰部伸展 ● 腰部伸展

● 被選擇的程式燈號將持續亮起。

● 接續按下按鍵可跳轉至下一個揉捏程式。

3 根據選擇的按摩程式，開始自動檢測肩部位置、或調節腰部位置。

● 通過  鍵調節喜好的腰部位置。

● 關於自動檢測肩部位置的詳細方法，請參照「雙重檢測功能」。(P23)

● 關於必須進行自動檢測肩部位置、調節腰部位置的按摩，請參考「揉捏技法按摩功能一覽表」。(P38)

4 開始按摩。

部位集中是指

用揉捏技法集中部位按摩的縮短7分程式。除了頸椎伸展/脊背伸展/腰部伸展以外，還可以選擇喜好的氣壓動作。關於各動作的詳情，請參照「部位集中動作」。(P36)

依喜好調整按摩

	位置調整	按摩強度	上半身·座墊氣壓 腿部氣壓	重複 轉換	氣壓部位	氣壓按摩	揉捏速度 捶打寬度 背部按摩/部位
自動程式 (使用中)	_____	可調整	可調整	可調整	可選擇	可選擇	_____
手動按摩 (使用中)	可調整 (請詳閱第38頁)	可調整	_____	_____	可選擇	_____	可調整 (請詳閱第38頁)
氣壓按摩 (使用中)	_____	_____	可調整	_____	可選擇	可選擇	_____



肩部與腰部的按摩球位置調整



調整

- 揉捏技法的移動範圍為「部分」或「局部」時，可以調節按摩位置。

揉捏按摩的強度調整

弱 ● ● ● ● ● 強

按摩強度

選擇並按下。

- 揉捏按摩計9段強弱可供選擇。
- 初始設定為「中」。
- 被選擇的強度燈號將亮起。
- 兩鍵同時按下則無效。

氣壓按摩的強度調整

弱 ● ● ● ● ● 強

上半身·座墊氣壓

選擇並按下。

弱 ● ● ● ● ● 強

腿部氣壓

- 氣壓按摩計5段強弱可供選擇。
- 初始設定為「中」。
- 被選擇的強度燈號將亮起。

依喜好調整按摩/附加功能

捶打按摩的寬度調整

按下  選擇捶打按摩寬度



- 捶打按摩計3種寬度可供選擇。
- 初始設定為「中」。
- 被選擇的強度燈號將亮起。
- 按鍵循環為「中」→「窄」→「中」→「寬」→「窄」→「中」→「寬」……

揉捏按摩的速度調整

按下  選擇揉捏按摩速度



- 揉捏按摩計4種速度可供選擇。
- 初始設定為「中」。
- 被選擇的強度燈號將亮起。
- 按鍵循環為「中」→「慢」→「中」→「快」→「緩慢」→「慢」→「中」→「快」……

揉捏按摩的範圍選擇

背部按摩/部位

按下  選擇揉捏按摩範圍



- 被選擇的程式燈號將持續亮起。
- 按鍵可切換「全身」「局部」或「定點」。

「手動按摩」氣壓按摩的設定

按下  選擇腿側氣壓按摩

- 被選擇的程式燈號將持續亮起。



注意

- 在調整按摩強度之前，應先從「中」開始再依照自身感覺調整，避免不適應。

重複上一個喜好的按摩手法

按下  重複

- 重複的按摩時間約30秒。
-  燈號將持續閃爍。
- 不適用於氣壓按摩。
- 進行中可按  解除該項指令。

轉換下一個按摩手法

按下  轉換下一個

- 不適用於氣壓按摩
-  燈號將持續閃爍。

氣壓按摩部位選擇

按下  選擇氣壓按摩的部位



- 計有「肩部」「腰・臀」「手部」「腿部」4個部位可供選擇。
- 被選擇的燈號將持續亮起。

「腿部伸展」氣壓按摩程式

按下  選擇「腿部伸展」氣壓按摩程式

- 在關閉「腿部氣壓」的狀態下，選擇「腿部伸展」按摩程式後，仍會開啓「腿部氣壓」
- 被選擇的燈號將持續亮起。

「脈衝」氣壓按摩程式

按下  選擇「脈衝」氣壓按摩程式

- 被選擇的燈號將持續亮起。

複合技法

手動程式與氣壓按摩程式的複合使用



1 在手動程式進行中，可依照喜好開啓氣壓按摩。



●被選擇的部位燈號將亮起。

2 開始按摩。

手動程式與氣壓按摩程式的複合使用



1 在氣壓按摩進行中，可依照喜好開啓手動程式。

基本手法 ☐ 模式選擇 ☐

部位集中① ☐ 部位集中② ☐

背部按摩/部位 ☐

● 被選擇的部位燈號將亮起。


2 開始按摩。

按摩的基本動作

基本的按摩動作


基本手法

向上揉捏

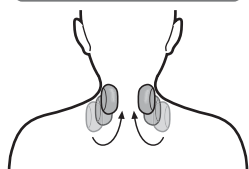


按摩球由下往上按摩

向下揉捏

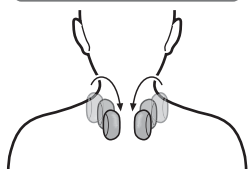


按摩球由上往下按摩

捶打

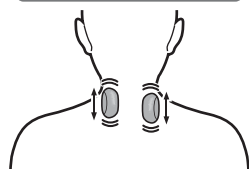

對肌肉施以捶打的動作


小圈捶揉

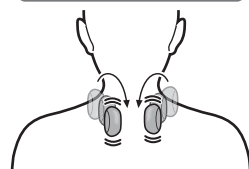

伸出按摩球抓取肌肉的揉捏方式


模式

環行

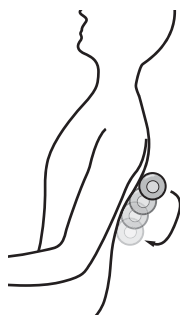


可串連各種手動按摩變成組合

3D

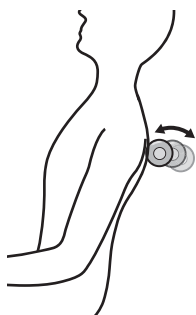

於手動按摩中，將按摩球立體化，呈現3D按摩

伸展

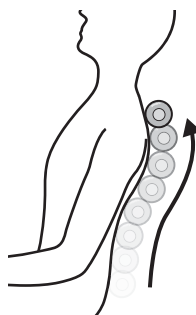


可串連各種手動按摩並延伸按摩範圍

氣壓按摩動作介紹


手動按摩

可以通過改變氣壓按摩的速度實現更有力的按摩。

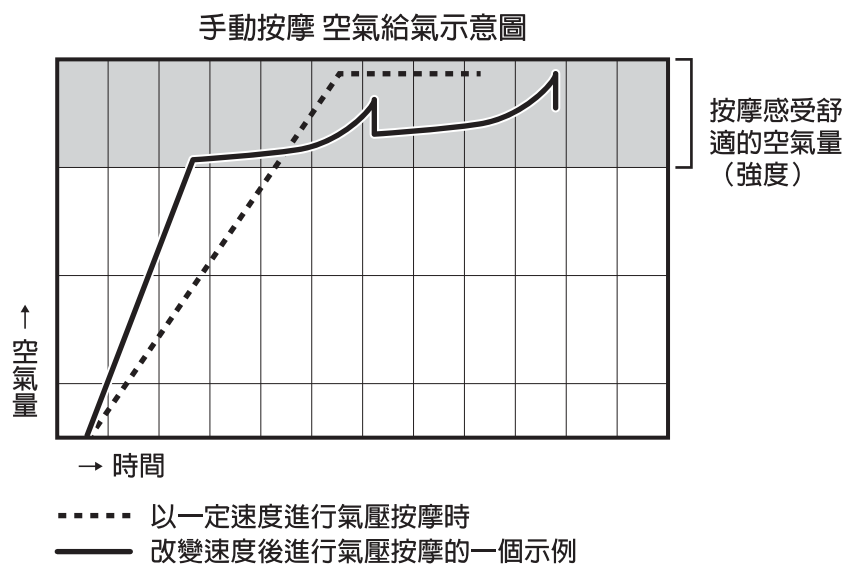


脈衝

脈衝式，具節奏性的氣壓按摩。

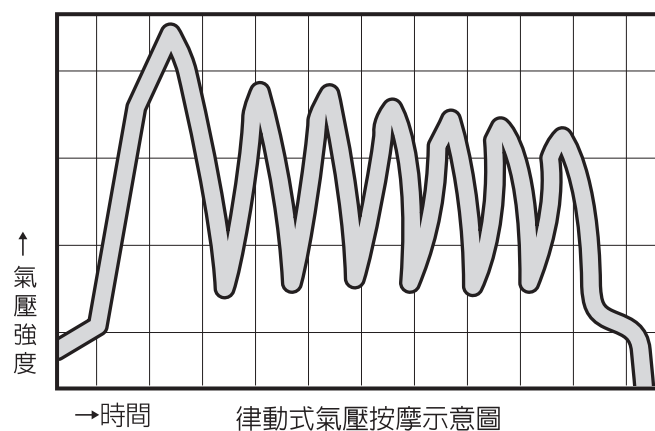

腿部伸展

如右圖，氣壓囊夾住腿部，再進行伸展的動作。

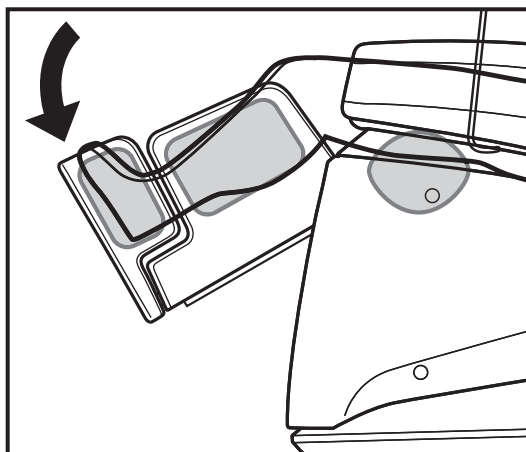

按摩的基本動作

揉捏技法按摩功能一覽表

在各揉捏技法按摩時，可調整內容一覽表。

		調整按摩位置	按摩強度	按摩速度	按摩幅度	按摩部位
基本手法	向上揉捏	●	●	●	-	全體/部分/局部
	向下揉捏	●	●	●	-	全體/部分/局部
	捶打	●	●	●	●	全體/部分/局部
	小圈捶揉	●	●	●	-	全體/部分/局部
	脊背拉伸	●	●	-	●	全體/部分
模式選擇	環行向上揉捏	●	●	●	-	全體/部分/局部
	環行向下揉捏	●	●	●	-	全體/部分/局部
	環行捶打	●	●	●	-	全體/部分/局部
	環行捶揉	●	●	●	-	全體/部分/局部
	3D向上揉捏	●	-	-	-	全體/部分/局部
	3D向下揉捏	●	-	-	-	全體/部分/局部
	3D捶打	●	-	-	●	全體/部分/局部
	3D小圈捶揉	●	-	-	-	全體/部分/局部
	伸展	●	●	●	-	全體/部分/局部
	伸展向上揉捏	●	●	●	-	全體/部分/局部
	伸展捶打	●	●	●	●	全體/部分/局部
	伸展小圈捶揉	●	●	●	-	全體/部分/局部
部位集中	頸部集中	與肩部位置對齊	●	-	-	-
	肩部集中	與肩部位置對齊	●	-	-	-
	肩胛骨集中	與肩部位置對齊	●	-	-	-
	集中腰部	與腰部位置對齊	●	-	-	-
	集中坐骨	-	-	-	-	-
	頸部伸展	與肩部位置對齊	-	-	-	-
	背部伸展	與肩部位置對齊	-	-	-	-
	腰部伸展	與腰部位置對齊	-	-	-	-

在進行按摩中改變按摩方式



- 按  鍵的話，剩餘時間會歸零，按  鍵的話，剩餘時間會繼續。

變更選擇自動程式

- 1 在「自動程式」進行中選擇其他的自動程式。



- 定時持續倒數
- 被選擇的部位燈號將亮起。

轉換為揉捏技法/部位集中按摩

- 2 在按摩動作時選擇喜好的按摩方式



- 剩餘時間會繼續
- 選擇的揉捏技法的燈點亮
- 從自動程式轉換過來時，按下揉捏技法鍵的話，按摩動作會暫時停止。

變更選擇氣壓按摩部位

- 3 在「氣壓按摩」進行中選擇其他的氣壓部位。



- 被選擇的部位燈號將亮起。

溫熱

警告

請勿長時間使用溫熱功能，熱感覺遲緩者請勿單獨使用

請坐上按摩椅後，再開啓溫熱功能。

使用本功能請勿超過60分鐘。

熱感覺遲緩者請勿單獨使用，需有人從旁注意。



1

按下  鍵，開啟電源。

-  鍵點亮，靠背自動傾斜至待機位置，腿部上升。
(按  鍵或  鍵或  鍵，可以中斷程式。)
- 約3分鐘以上不進行操作時，電源會自動切斷，
 鍵燈滅

2

按下 溫熱  開啟溫熱功能。

- 溫熱  燈號將亮起。
- 溫熱功能定時60分鐘自動關閉。
- 溫熱功能為單獨開啓/關閉。
- 與按摩功能同時使用時，按摩功能結束時，溫熱功能也同時結束。

關閉溫熱功能

第2次按下 溫熱  關閉溫熱功能

- 溫熱  燈號熄滅。

- 溫熱的感覺會因個人、體型、衣著或室溫而差異。

兒童安全鎖設定

兒童安全鎖的機能

為避免兒童把玩控制器而發生危險或意外，本機能於設定(上鎖)後，所有按鍵於解除前將無法使用。



1 按下  鍵，開啟電源。

-  鍵點亮，靠背自動傾斜至待機位置，腿部上升。
(按  鍵或  鍵或  鍵，可以中斷程式。)
- 約3分鐘以上不進行操作時，電源會自動切斷，
 鍵燈滅

2 按下 椅背傾躺  鍵，座椅靠背和腿部收納完成後，長按  和  鍵約2秒鐘。

- 執行兒童安全鎖定功能時， 鍵閃爍。
- 執行兒童安全鎖定功能時，全部功能均無法使用。

解除兒童安全鎖定功能時

請長按  和  鍵約2秒鐘。

檢修及保養方法

機身的檢修方法



警告

嚴禁用濕手拔電源。可能導致觸電。



注意

檢修時，務必從電源插座上拔下電源插頭。
以免導致觸電或受傷。
勿使用汽油、稀釋劑、酒精等藥品擦拭。
以免導致觸電・著火。

椅套・背墊・頭枕部分

- 1.把布用含有稀釋的中性洗潔劑浸濕後，盡量擰乾。
 - 2.用1的布擦拭髒處。
 - 3.用浸水擰乾的布擦掉洗潔劑。
 - 4.用乾布擦拭，讓其自然風乾。
- 背墊和頭枕請勿熨燙。以免導致椅套損傷。
 - 污手或髮膠等物會損傷皮革，請好好擦拭。

樹脂部分

- 1.把布用含有稀釋的中性洗潔劑浸濕後，盡量擰乾。
 - 2.用1的布擦拭髒處。
 - 3.用乾布擦掉洗潔劑。
- 請勿使用牙膏。以免導致損傷・變色・龜裂。

按摩器、背部下方(控制盒)

用乾布擦拭。

- 請勿用濕毛巾擦拭。以免導致故障。

保養方法



警告

勿在浴室等濕氣大的場所使用及放置。以免導致觸電・火災・故障・發霉・生鏽。

擦拭完機身上的污垢後，請放置於溫度・濕度適宜、潔淨之處。
長時間未使用時，請罩上套子以免落塵。

- 避免置於日照長的地方或取暖設備附近、高溫之處。以免導致機身或附屬品變色、變質。

機身的移動方法


⚠ 注意

勿載人或載物移動按摩椅。
以免導致故障或受傷。
地板、木質等容易損壞的地面上，請勿拖拽，用腳輪移動按摩椅。
以免損壞地面。
注意不要將電源線及遙控器的線纏到腳上或腳輪上。
以免導致受傷。

用腳輪移動時

抬起機身的前面，邊推邊移動。


- 放下時，請勿將腿部與地面碰撞，應慢慢放下。

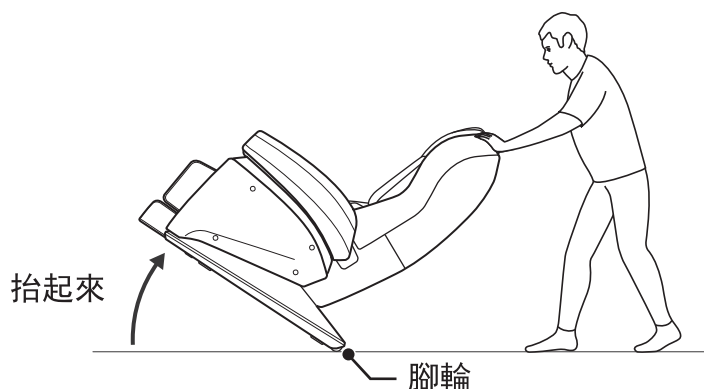

2人以上移動時

取下手腕組件和扶手架，放倒背部，手扶著機身前面的底部和後面靠背底部(參照下圖)，抬起來搬運。


- 關於手腕組件和扶手架的拆除方法，請參照P10～P13。
- 因為是重物，所以必須2人以上搬運。
- 請注意腳下，慢慢放下。

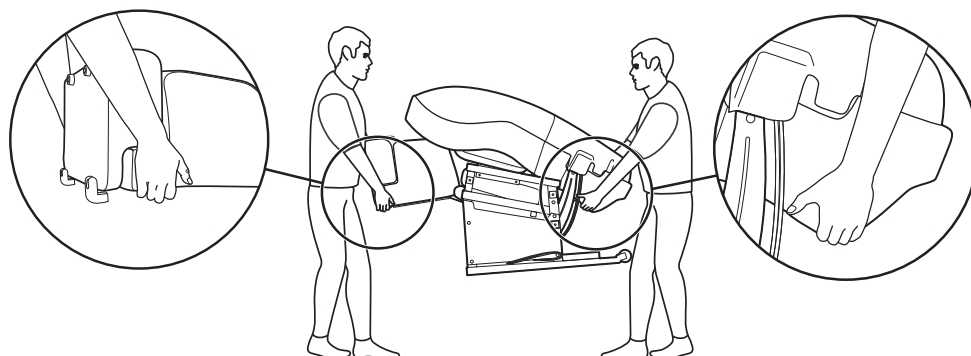

Q&A (問&答)

Q1 左右強度不同，感到懸殊。

A 為使按摩更舒適，採用了按摩球交替捶打結構。因此，按摩球運作時有時不可避免地會出現位置偏移。因此，有時會感到左右強度不同，但並非故障。

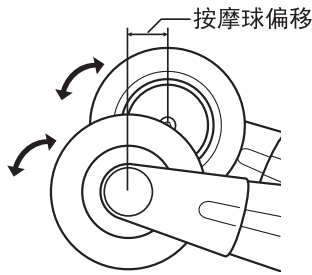

Q2 有沒有更有力的按摩方法？

A 請嘗試以下方法：

- 將靠背部躺放。
- 取下背墊。
- 在按摩椅上坐穩，身體緊靠在靠背上。
- 調節按摩強度。

Q3 遙控器架晃動不穩。

A 重新擰緊固定螺絲。
遙控器架脫落時，先擰緊固定螺絲，然後插入托架，再重新擰緊固定螺絲。還要檢查放置架的安裝螺絲是否有鬆動，鬆動時，請使用六角扳手擰緊。

Q4 腿部不合體。

A 伸縮腿部，調節長短。
● 身材嬌小者：將背墊部豎起，抬高按摩椅的腿部。

Q5 正在接受門診治療，是否可以使用按摩椅？

A 請諮詢門診醫生後再決定能否使用。
按摩稱為「觸壓刺激」，是通過施加壓力使肌肉放鬆、幫助血液循環的行為。有些疾病有可能因按摩而加重，所以，請務必諮詢醫生。

Q6 按摩椅下面可以鋪設電熱毯嗎？

A 不可以鋪設電熱毯，以免引起火災。
按摩椅會損傷電熱毯的發熱體，並有因此引發火災的危險。

Q7 按摩椅背墊部、腿部不能自動到達待機位置。

A 按摩椅背墊部放倒時，或腿部抬起時，即使按下  鍵，也不能達到待機位置。

Q8 身高不足約150cm或身高約185cm以上的人可以使用嗎？

A 可以使用。
檢測體形時，即使微調肩部位置，也有可能不合適，因此，建議按以下方法使用。
● 身材嬌小者：將靠墊部豎起，抬高按摩椅的腿部。
● 身材高挑者：將靠墊部放倒，放下按摩椅的腿部。

Q9 手臂無法到達手腕組件上。

A 將背墊部豎起，調節手臂位置。

Q10 肩部、手部氣壓按摩後，肩部和手臂發紅。

A 使用後，肩部和手臂有時會留下按摩痕跡，此為按摩所致。經過一段時間後，痕跡會逐漸消失。另外，肩部氣壓按摩時，不要身穿露出肩部的服裝。

Q11 即使檢測體形後，肩部位置也不合體。

A 請在按摩椅上坐穩，頭貼在背墊部向後靠，再進行體形檢測。
也可以手動調節。詳情請參照P21。

Q12 可否在卸下手臂組件的狀態下使用？

A 不可以。氣囊送氣口和排氣口外露，垃圾或灰塵進入會導致故障。

Q13 腿部伸展按摩時，按摩椅時常發出「咯噠」的聲響。

A 有時會發出聲響，並非故障。
在結構上，按摩椅腿部和電動作動器分離的瞬間，有發出聲響的情況。


Q14 按摩時按摩椅發出「咕咕」「吱吱」的聲響。

A 這些聲響均源於構造，並非異常。請參考《發現故障》。(P46)

Q15 請教一下按摩椅機身的尺寸。


A 請參考下列圖示。

正面

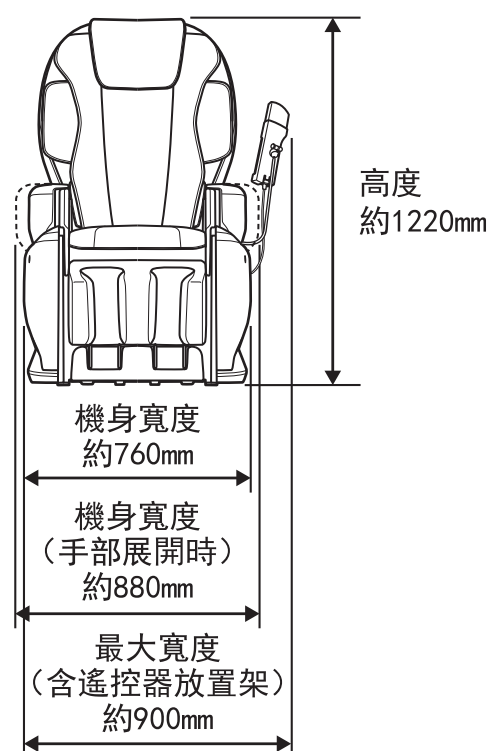


側面

未躺放時

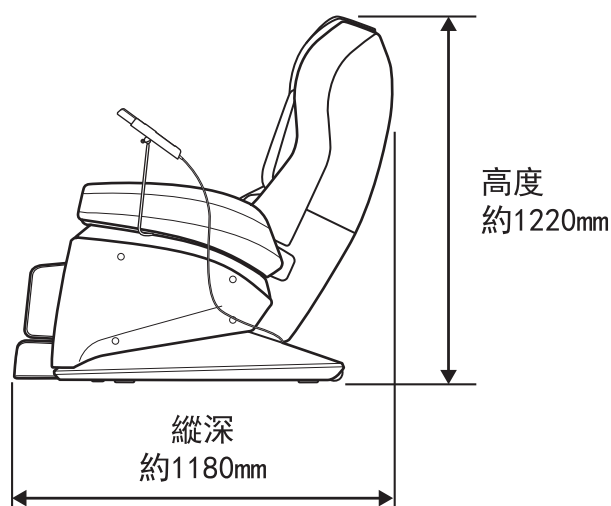

躺放時

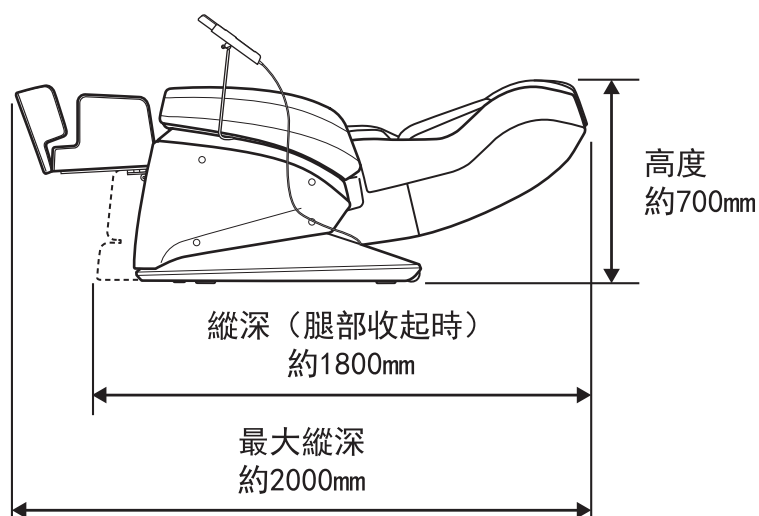


發現故障

警告

禁止改造或自行分解、修理。有起火、運作異常、受傷的風險。

使用過程中有以下聲響或感覺，均源於結構，並非異常，對使用壽命等均無影響。

- 按摩球上下移動時「咔噠咔噠」的聲響。
- 按摩時齒輪和馬達的聲響。
- 按摩球和椅套的摩擦聲響（尤其是揉捏按摩時）。
- 捶打、小圈捶揉按摩時「咔噠咔噠」的聲響。（尤其是從肩部移向背部時）。
- 揉捏、捶打、小圈捶揉按摩時，對按摩球的施力方式不同，按摩速度也會變化。
- 調節「速度」時產生的不同聲響。
- 增加負荷時馬達發出的「嗚嗚」聲。
- 自動程式時，為配合使用者的體形，按摩球自動前後調節時的聲響（咕咕聲）。
- 氣壓按摩時的氣壓機聲和氣囊排氣聲。
- 氣囊膨脹時發出的聲響。
- 「肩部」按摩時發出的嘎吱嘎吱聲。
- 躺放按摩椅時，靠背和座位發出的摩擦聲響（吱吱聲）。
- 左右按摩球高度不同。
（由於採用了交替捶打設計結構，不可避免地會出現高低不同的現象，並非故障。）
- 縫製部位的摩擦聲（吱吱聲）

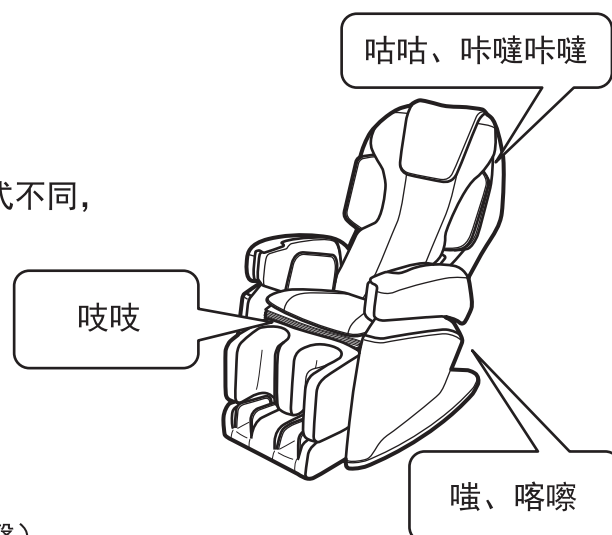

現象	檢查部位	採取措施
不運作	電源插頭是否脫落？	將電源插頭插入電源插座。
	機身後側右下方的電源開關是否關閉？	打開電源開關。
動作止於途中（按遙控器也無反應）	背墊部是否碰觸牆壁或其他障礙物？	移動按摩椅，確保機身不會碰到障礙物。先關閉機身後側右下方的電源開關，然後重新打開。
	是否強行施力？ （為保障安全，按摩球受到異常外力時，安全裝置會啟動、停止全部功能。）	身體離開背墊部，先關閉機身後側右下方的電源開關再打開，重新從最初開始操作。
不能躺放	電源插頭是否脫落？	將電源插頭插入電源插座。
	背墊部是否碰觸牆壁或其他障礙物？	移動按摩椅，確保機身不會碰到障礙物。
腿部不能放下至收納位置	腿部氣壓按摩是否處於「開」的狀態？	關閉腿部氣壓按摩功能。

仔細檢查



注意

一段時間未使用後，請詳細閱讀使用說明書，在確認本產品可正常運作後再使用。
有發生事故或受傷的風險。



仔細檢查
長年使用時
請一定仔細檢查！

有以下問題嗎？

- 有焦糊味兒。
- 電源線、電源插頭異常發熱。
- 移動電源線時，電源時通時斷。
- 有其他異常情況。

請中止
使用

為防止故障和事故，請將機身電源開關撥至「OFF」，並將電源線的插頭從插座中拔出，然後向經銷商或本公司客戶諮詢處諮詢。

商品規格

品名			按摩椅		
型號			JP-870		
額定	電源		AC110V		
	時間		30 分		
	消耗功率 (50 / 60Hz)		90W （待機電力: 0.3W）		
	電熱器功率		40W		
按摩球速度調整範圍	揉捏		4 段階調節（約 8～約30 回 / 分）		
	捶打		4 段階調節（約 250～約 650 回 / 分）		
	上下移動		約 5.4 cm/ 秒		
氣壓按摩（氣壓囊空氣壓力）			約 45k Pa（千帕）		
按摩球強度調整範圍	自動程式時		9 段階調節		
	手動程式時		9 段階調節		
氣壓按摩強度調整範圍	自動程式時		上半身・座（肩、手、腰・座）：5 段階調節 脚部		

MEMO

MEMO



FUJIIRYōKI

FUJI MEDICAL INSTRUMENTS MFG.CO.,LTD.